



زخمیران  
Zakhmiran



مرهمی بر  
زخم‌های مردم ایران

# زخمیران اینجاست تا هر کسی که در ایران با زخمی زندگی می‌کند، به پانسمان مناسب دسترسی داشته باشد.

زخمیران، با ریشه در دل این آب و خاک و با درک آلام و مشکلات افراد مواجه با زخم‌های مختلف، تولید پانسمان را آغاز کرده است تا مرهمی باشد بر زخم‌های مردم ایران. ما پانسمان‌های مورد نیاز درمان زخم را با کیفیت بالا و قیمت مقرون به صرفه عرضه می‌کنیم تا بیماران و متخصصان مراقبت‌های زخم را در تسهیل فرایند درمان یاری نموده و پیچیده‌ترین زخم‌ها را به مقصد سلامتی برسانیم.

« مرهمی بر زخم‌های مردم ایران »



کیفیت مطلوب



قیمت مناسب



تولید ایران



**"درمان هیچ زخمی به دلیل نبود پانسمان متوقف نمی‌شود."**

ما متعهد می‌شویم پانسمان‌هایی را در اختیار جامعه پزشکی و بیماران ایران قرار دهیم که ضمن سهولت استفاده، ویژگی‌های درمانی زخم مانند عدم چسبندگی، حفظ رطوبت، کاهش عفونت و درد را داشته باشند.



## Zakhmiran | اسپری و محلول ضد عفونی کننده | برای انواع زخم

این اسپری و محلول ضد عفونی کننده حاوی ترکیبات زیست سازگار مانند EDTA، پلی هگزامتیلن گواناید و تری متیل گلايسين است. این ترکیبات، جایگزین مناسبی برای روش های سنتی پاکسازی و ضد عفونی زخم به شمار می آیند. این محصول قارچ ها و باکتری های رایج در بستر زخم را کاهش می دهد و تا ۹۹.۹ درصد از عفونت را از بین می برد. همچنین EDTA موجود در این محلول با مهار آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز (MMPs) باعث تسریع بهبود زخم های مزمن می شود.

### مزایا:

- از بین بردن تا ۹۹.۹ درصد از قارچ ها و باکتری های موجود در بستر زخم
- مهار آنزیم های مخرب ماتریکس متالوپروتئیناز (MMPs) و تسریع بهبود زخم های مزمن
- حفظ رطوبت و تمیزی زخم در کمترین زمان
- بدون بو و بدون تغییر رنگ زخم و پوست اطراف
- عدم ایجاد سوزش، حساسیت و خشکی پوست
- افزایش اکسیژن رسانی و تسریع بهبودی زخم
- موثر در جلوگیری و حذف بیوفیلم های



Wound Spray & Solution

۷۵ میلی لیتر

۵۰۰ میلی لیتر



## Zakhmiran | پودر درمان زخمیران | برای زخم های حفره ای و تونلی

این پودر برای درمان زخم های حفره ای و تونلی طراحی شده است و حاوی بیوپلیمرهایی مانند پلی ساکراید، پلی استیل گلوکز آمین و آلژینات می باشد. این ترکیبات سازگار با بدن هستند و با جذب ترشحات زخم، محیط مرطوبی را در بستر زخم ایجاد می کنند. پودر زخمیران همچنین با خواص آنتی میکروبیال خود می تواند غشای میکروبها را تخریب کرده و باعث کاهش عفونت شود. این پودر یک لایه محافظتی ایجاد کرده که باکتری ها را از زخم دور نگه می دارد و سرعت بهبودی را افزایش می دهد.

### مزایا:

- قابل استفاده برای طیف وسیعی از زخم های حفره ای و تونلی
- حفظ محیط مرطوب و جذب ترشحات زخم برای تسریع ترمیم
- خاصیت آنتی میکروبیال برای کاهش عفونت و محافظت از زخم
- ایجاد لایه محافظ در برابر میکروبها و افزایش سرعت بهبودی
- بدون نیاز به آماده سازی یا فعال سازی
- کاهش درد و تسکین زخم
- پیشگیری از ایجاد اسکار و بهبود ظاهری زخم



Powder Wound Dressing

۱ گرمی

۲ گرمی



## Zakhmiran پانسمان ماتریکس زخم نقره | برای زخم های عفونی

پانسمان ماتریکس نقره زخمیران ، با بهره‌گیری از ترکیب نقره و لیپیدهای خنثی، محافظتی مؤثر و تسکین‌بخش برای زخم‌های مستعد عفونت فراهم می‌کند. این پانسمان غیرچسبنده، با آزادسازی مداوم ذرات نقره، باکتری‌های مضر را از بین برده و از گسترش عفونت جلوگیری می‌کند. همچنین، به دلیل وجود بیوپلیمرهای زیست‌سازگار مانند کیتوسان و لایه‌های لیپیدی، از چسبیدن به بستر زخم ممانعت کرده و فرآیند تعویض پانسمان را بدون درد و آسیب به بافت سالم انجام می‌دهد. پانسمان ماتریکس نقره زخمیران انتخابی ایده‌آل برای تسریع بهبودی زخم‌های دیابتی، زخم‌های بستر و سوختگی‌ها است.

### مزایا:

- ضدباکتریایی قوی و سریع با از بین بردن میکروب‌های مقاوم مانند MRSA
- آزادسازی کنترل‌شده نقره در تماس با ترشحات زخم برای کنترل بهتر عفونت
- عدم چسبندگی به زخم و محافظت از بافت سالم
- پیشگیری از خیس‌شدگی زخم و تورم پوست اطراف
- انعطاف‌پذیری بالا و قابلیت برش به اندازه زخم



Matrix Wound Dressing with Ag



10cm X 10cm

## Zakhmiran پانسمان ماتریکس زخم | برای انواع زخم

پانسمان ماتریکس زخمیران یک پانسمان غیرچسبنده با لیپیدهای خنثی است که برای مراقبت از زخم‌های سطحی، حاد و مزمن طراحی شده و با ترکیب کلاژن و کیتوسان، فرآیند بهبود زخم را به طور قابل‌توجهی تسریع می‌کند. این پانسمان با تحریک تکثیر سلولی، رشد بافت و افزایش رگ‌زایی، محیطی ایده‌آل برای ترمیم سریع‌تر زخم فراهم می‌آورد. همچنین، خاصیت باکترواستاتیک آن، از بروز عفونت جلوگیری کرده و با ایجاد یک سد محافظتی، به روند بهبودی پایدار و بی‌خطر زخم کمک می‌کند.

### مزایا:

- مناسب برای انواع زخم‌های سطحی حاد و مزمن
- تحریک تکثیر سلولی و رشد بافتی برای ترمیم سریع‌تر
- تحریک تولید پروتئین در ماتریکس خارج سلولی و افزایش رگ‌زایی
- خاصیت باکترواستاتیک برای جلوگیری از عفونت زخم
- عدم چسبندگی به زخم و حفاظت از بافت سالم
- پیشگیری از خیس‌شدگی و مسریش زخم و پوست اطراف
- انعطاف‌پذیری بالا و امکان برش به اندازه مورد نیاز



Matrix Wound Dressing



10cm X 10cm

ژل دبریدمان زخمیران، با فرمولاسیونی پیشرفته و منحصر به فرد، برای تسریع فرآیند بهبود زخمها و تسهیل دبریدمان اتولیتیک طراحی شده است. این محصول با ترکیبات موثری مانند اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)، پلی هگزامتیلن گواناید، گلیسرین و هیدروکسی اتیل سلولز، محیطی ایده آل برای بازسازی و ترمیم زخم ایجاد می کند.

### مزایا:

- مناسب برای انواع زخمهای حاد و مزمن
- کمک به پاکسازی و حذف بافت های مرده
- رطوبت رسانی برای تسهیل فرآیند ترمیم
- خاصیت آنتی باکتریال برای جلوگیری از عفونت
- سهولت در استفاده و بدون ایجاد درد
- کاهش احتمال ایجاد اسکار



Wound Debridement Gel

۱۵ گرمی



## نحوه استفاده محصولات زخمیران

### ژل دبریدمان زخم



زخم اطراف آن را با اسپری زخمیران یا محلول آنتی سبتیک تمییز نمایید.



مقداری از ژل را به طور یکنواخت روی سطح زخم قرار دهید.



زخم را با یک پانسمان ثانویه مناسب بپوشانید تا محیط مرطوب حفظ شود.



بسته به میزان ترشح زخم و توصیه پزشک یا درمانگر، پانسمان را هر ۲۴ تا ۷۲ ساعت تعویض کنید.

### پانسمان ماتریکس زخم



زخم اطراف آن را با اسپری زخمیران یا سرم شستشو تمییز نمایید.



پانسمان را با لایه کاغذی محافظ از بسته خارج کنید و در صورت لزوم با استفاده از یک قیچی استریل به اندازه زخم برش دهید.




لایه کاغذی روی پانسمان را از یک سمت بردارید و پانسمان را روی زخم قرار دهید.



از یک پانسمان ثانویه استریل مناسب، مانند سوپر جاذب یا فوم جهت جذب آگزودا بر روی ماتریکس زخمیران استفاده نمایید.

### پانسمان ماتریکس زخم نقره

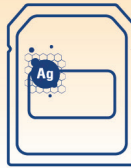

زخم اطراف آن را با اسپری زخمیران یا سرم شستشو تمییز نمایید.



پانسمان را با لایه کاغذی محافظ از بسته خارج کنید و در صورت لزوم با استفاده از یک قیچی استریل به اندازه زخم برش دهید.




لایه کاغذی روی پانسمان را از یک سمت بردارید و پانسمان را روی زخم قرار دهید.



از یک پانسمان ثانویه استریل مناسب، مانند سوپر جاذب یا فوم جهت جذب آگزودا بر روی ماتریکس زخمیران استفاده نمایید.

### پودر درمان زخمیران

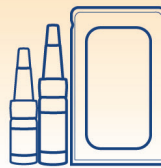

زخم اطراف آن را با اسپری زخمیران یا سرم شستشو تمییز نمایید.




پودر را مستقیم بر روی بستر زخم ریخته تا لایه نازکی از پودر، کاملاً زخم و لبه های آن را پوشش دهد.



محل زخم را با استفاده از یک پانسمان ثانویه استریل مناسب ببندید.

### اسپری و محلول ضد عفونی کننده زخم

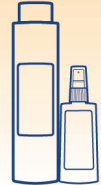

سطح زخم را با اسپری کاملاً مرطوب کرده.



با یک گاز از داخل به سمت خارج زخم بکشید.



گاز آتشه به محلول را به مدت ۱۵ دقیقه روی بستر زخم قرار دهید.



گاز را برداشته و با توجه به شرایط زخم پانسمان مناسب روی زخم قرار دهید.

# ZakhmIran

۰۲۱-۶۶۹۵۰۱۴۳

zakhm-iran.com

z a k h m . i r a n

تهران، چهارراه ولیعصر، ولیعصر به سمت شمال،  
بالتر از مجتمع تجاری اداری ابریشم، پلاک ۱۴۷۱  
ساختمان پروفیسور حسابی



برای آشنایی با زخمیران اسکن کنید.

